

# Veiledning ved skifte av batterier på Duodopa<sup>®</sup> pumpe

## A. Praktiske opplysninger

1. Det benyttes 2 stk AA 1,5 V batterier (ikke benytt oppladbare batterier).

## B. Pumpealarm

1. Pumpa vil gi alarm når batterinivået er lavt.
2. **SvaktBat** vises i pumpas display.
3. Pumpa vil fortsatt gi medisin, men bytt batteriene snarest.

## C. Bytte batterier

1. Stopp pumpa ved å holde **START/STOPP**-knappen inne i 3 sek. **STOPPET** vises i displayet.
2. Hold inne **PÅ/AV**-knappen for å slå av pumpa.
3. Ta av batteriluken. Skyv ned pilen mens du skyver luken ut til siden. Ta ut de brukte batteriene.
4. Sett i nye batterier og sett batteriluken på igjen. Pumpa slår seg automatisk på når batteriene settes i.
5. Start pumpa ved å holde **START/STOPP**-knappen inne i 3 sek.

**Obs!** Pumpen må lagres uten batteri når den ikke er i daglig bruk.



