

# Bekreftelse av intestinalsondeposisjon med røntgen

## Utstyr

Treveiskran eller Luer-Lock ww-adapter, sprøyte og injeksjonskanyle, kontrastmiddel og drikkevann.

## Anbefaling

For best mulig resultat bør pasienten ligge.

## Injisering av kontrastmiddel eller skylling av intestinalsonden

1. Bruk ww-adapter eller treveiskran.

2A. Fest ww-adapteren til intestinalsonden. Injisér kontrastmiddel. Volumet på intestinalsonden er ca. 3 ml. Husk å skylle intestinalsonden godt med vann til slutt.

eller

2B. Fest ww-adapteren til treveiskranen. Injisér kontrastmiddel. Volumet på intestinalsonden er ca. 3 ml. Husk å skylle intestinalsonden godt med vann til slutt.



