





Hurtig-guide: Daglige rutiner ved nasojejunal sonde (16-timers behandling)

Morgenrutine: Koble til og starte pumpa

Fest pumpa forsvarlig i ei veske eller i en bæresele og deretter på pasienten. Koble pumpa med legemiddelkassett til sonden.


1		Hold inne PÅ/AV i tre sekunder til tekst vises i displayet. Pumpa gjør en selvtest. Dette tar ca 30 sekunder. STOPPET vises i displayet når selvtesten er ferdig.
2		Hold inne START/STOPP til (---- ---- ----) forsvinner. Pumpa går gjennom/viser de innstilte verdiene. Det tar ca 15 sekunder. Det står nå INF i displayet.
3		Trykk MORGENDOSE . Den innstilte morgendosen vises.
4		Trykk MORGENDOSE igjen. Dosen gis og i displayet vises nedtelling av dosen. Pumpa gir deretter den kontinuerlige dosen. INF vises igjen i displayet.

Kveldsrutine: Stenge og koble fra pumpa

1		Hold inne START/STOPP til (---- ---- ----) forsvinner. STOPPET vises i displayet. Pumpa er stoppet og gir ikke infusjon.
2		Hold inne PÅ/AV til (•••• •••• ••••) forsvinner.
3		Koble pumpa og forlengelseslangen fra sonden.

NB! Nesesonden skal **IKKE** skylles. Den rommer 5 ml = 100 mg levodopa.

Gi ekstra dose

1		Pumpa er STARTET INF vises i displayet.
2		Trykk på EKSTRA DOSE knappen. To "pip" høres. BOLUS vises i displayet – ekstradosen gis. Pumpa går automatisk tilbake til å gi kontinuerlig infusjon når ekstradosen er gitt. INF vises igjen i displayet.

